

# Housemate

Infrarood omgevingsbediening via de tablet en meer...

V14-01



Draadloos mobiel telefoneren, omgevingsbediening en alle functies die een tablet of telefoon biedt toegankelijk voor mensen met een beperking - het kan middels de Housemate. Wanneer men door een beperkte hand- en/of armfunctie het touchscreen niet meer kan bedienen biedt de Housemate een oplossing middels een enkele functie schakelaar of een joystick.

De Housemate Pro is een vernieuwde versie van de ClicktoPhone. Het grote verschil is dat de Housemate niet alleen de functionaliteiten van de telefoon of tablet toegankelijk maakt, maar ook de mogelijkheid biedt om de omgeving aan te sturen.

## Werking

De Housemate Pro bestaat uit software voor op de tablet of telefoon en een bluetooth interfacekastje. Dit interfacekastje is voorzien van een schakelaaraansluiting en een 6-pins aansluiting voor een

joystick of vijffunctieschakelaar. Naast deze aansluitingen heeft het kastje een krachtige Infrarood zender. De menustructuur is geheel aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker.

Naast de functionaliteiten van de tablet bevat de Housemate 16 programmeerbare pagina's voor het bedienen van de omgeving. Deze pagina's worden naar de behoeften van de gebruiker ingericht. De Infraroodcodes zijn gemakkelijk aan te leren en in totaal is er ruimte voor 250 IR codes.

## Bediening

Welke bedieningsoptie en welke functionaliteiten van de Housemate geschikt zijn voor de gebruiker bepaalt Focal altijd middels een proefpassing waarbij de Housemate gedemonstreerd en uitgetest wordt.

### Voor meer informatie

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen via: 013-5333103 of [info@focalmeditech.nl](mailto:info@focalmeditech.nl) of kijk op [www.focalmeditech.nl](http://www.focalmeditech.nl)

## Focal Meditech BV

Droogdokeneiland 19, 5026 SP Tilburg  
T 013 533 31 03 | F 013 533 50 04  
[info@focalmeditech.nl](mailto:info@focalmeditech.nl) | [www.focalmeditech.nl](http://www.focalmeditech.nl)

**FOCAL**  
meditech

luisteren  
maken  
verbeteren