



**SLING**  
DYNAMISCHE ARMONDERSTEUNING

*Handleiding*



# Inhoud

<b>INLEIDING</b>	<b>pagina 2</b>
<b><i>VOOR WIE BEDOELD</i></b>	<b>pagina 3</b>
<b><i>WERKINGSPRINCIPE</i></b>	<b>pagina 4</b>
<b>DE ONDERDELEN</b>	<b>pagina 6</b>
<b><i>BESCHRIJVING</i></b>	<b>pagina 6</b>
<b><i>MONTAGE</i></b>	<b>pagina 9</b>
<b><i>INSTELLEN</i></b>	<b>pagina 9</b>
<b><i>GEBRUIK</i></b>	<b>pagina 14</b>
<b>WAARSCHUWING</b>	<b>pagina 16</b>
<b>ONDERHOUD</b>	<b>pagina 16</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>pagina 16</b>
<b>CE KEURMERK</b>	<b>pagina 21</b>
<b>CONTACTINFORMATIE</b>	<b>pagina 21</b>

## INLEIDING

Dit is de gebruikershandleiding van de op een rolstoel, stoel of op een vrijdbaar onderstel gemonteerde dynamische arondersteuning SLING (hierna: SLING). De SLING wordt gefabriceerd en geleverd door FOCAL Meditech, een bedrijf dat is gespecialiseerd in lichaamsonder-



steuning. In deze handleiding wordt informatie gegeven over het artikel, over de toepassing ervan en over de consequenties van het gebruik. Het doel van deze informatie is het langdurig succesvol en effectief kunnen gebruiken van de dynamische arondersteuning. U weet zodoende wat u van de dynamische arondersteuning wel en niet kunt verwachten, leert in hoofdlijnen hoe deze ingesteld moet worden, en waar u in het gebruik op moet letten. Ook vindt u alle informatie om met de leverancier in contact te kunnen treden. Leest u deze informatie aandachtig: goede kennis van het hulpmiddel leidt tot een betere inzet ervan en tot betere gebruikresultaten. Het is zin- nig om ook de personen in uw omgeving, bijvoorbeeld diegenen die mogelijk bij uw verzorging betrokken zijn, deze handleiding te laten lezen!

## VOOR WIE IS DE SLING BEDOELD?


De SLING is bedoeld voor alle personen die door een geringe spierkracht of door neurologisch uitval de onderarm en hand niet goed meer kunnen positioneren en gebruiken. Voor de toepassing dient men nog enige inzetbare functies in de schoudergordel en bovenarm te hebben, alsmede nog enige inzetbare handfunctie (grijpen, manipuleren). De armondersteuning kan ook goed ingezet worden door gezonde personen die met sterk belastende werkhoudingen te maken hebben. De 'SLING' kan één- of tweezijdig ingezet worden. De vraag of één of twee dynamische armondersteuning gebruikt worden is afhankelijk van diverse factoren, zoals de individuele beperkingen en mogelijkheden van de gebruiker en diens gebruiksbehoeften. De gebruiker van de SLING kan in allerlei omgevingen actief zijn: thuis, op school, op een werkplek, in een instelling of buitenshuis. De SLING kan tevens op therapeutische wijze ingezet worden, bijvoorbeeld door de gebruiker te laten werken met een allengs groter bereik of tegen weerstand in.



Let bij het lezen met name op de instructies die betrekking hebben op een veilig gebruik. Passages die voor de veiligheid van groot belang zijn, worden in de tekst met een hiernaast getoond veiligheidssymbool gemarkeerd.

## WERKINGSPRINCIPE VAN DE SLING

De dynamische armondersteuning SLING is een assenstelsel waarlangs een koord geleid wordt. Het koord verbindt een armopvang met een contragewicht. De SLING kent altijd een bevestigingspunt aan de 'vaste' wereld (stoel, rolstoel of onderstel). De onderarm rust in de armopvang, en de SLING kan nu grotendeels het gewicht van de arm dragen en de schoudergordel ontlasten. Het contragewicht helpt vervolgens om bewegingen van de arm en hand tegen de zwaartekracht in mogelijk te maken.

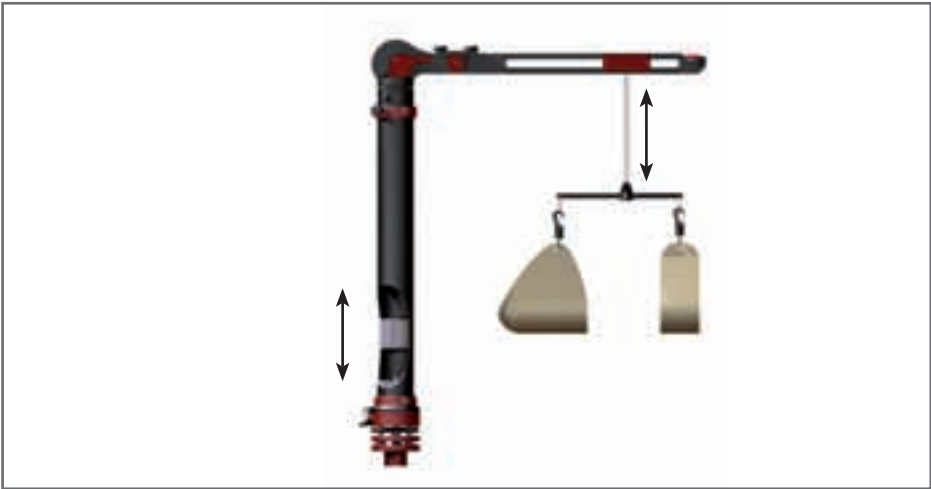

Dynamische armondersteuning wordt met name gebruikt door personen met een beperkte spierkracht in de schoudergordel of armen ten gevolge van neurologische of orthopedische aandoeningen in deze regionen. Met inzet van eigen restvermogens kan men de hand zodoende toch daar brengen waar deze nuttig is. Reiken, grijpen en verplaatsen en met de hand allerlei dagelijkse activiteiten uitvoeren wordt nu weer mogelijk. De SLING werkt zowel in het horizontale als in het verticale vlak en behoeft geen elektrische bekrachtiging. Een typisch kenmerk van de SLING is, dat het gehele ophangstelsel de arm van de gebruiker van bovenaf benadert. Onder de arm bevinden zich zodoende, anders dan bij andere types armondersteuning, geen onderdelen die ruimte innemen. Armondersteuning van dit type hebben een goede geschiktheid indien de voorziening in conflict zou

kunnen komen met objecten zoals een werkblad, stuurkast, leuning of toetsenbord. De SLING kent hierdoor een gebruikersgroep met eigen mogelijkheden en wensen.

Zoals alle armondersteuningen van FOCAL Meditech, kent de voorziening een zeer robuuste constructie en een heel geringe speling in de verschillende assen. De assen zijn voorzien van een zeer hoogwaardige lagering. Hierdoor verlopen bewegingen heel licht. Door de lichte loop, gecombineerd met een goede pasvorm en een grote instelbaarheid wordt een heel geringe krachtsinspanning van de gebruiker gevraagd. De SLING is goed aanpasbaar; indien nodig worden individuele varianten vervaardigd.

## DE ONDERDELEN


### BESCHRIJVING

Hieronder worden de onderdelen van de SLING vanaf de arm van de gebruiker beschreven.

- Bij gebruik bevindt de arm van de gebruiker zich in de armopvang. De armopvang bestaat doorgaans uit twee onderdelen van leer, te weten een polsstuk en een elleboogstuk. Het polsstuk kan zonnig vervangen worden door een gecombineerd pols/ handstuk. Soms wordt alleen een los polsstuk gebruikt.



- De gecombineerde armopvang kent een kantelverstelling in de vorm van een staaf (a). Met deze kantelverstelling wordt de balans van de onderarm ingesteld. De staaf is op zijn beurt middels een klosje (b) verbonden met een koord. Dit klosje is niet noodzakelijk indien alleen een los polsstuk wordt gebruikt.

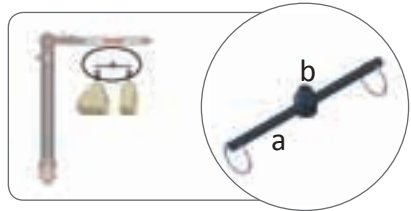


- Het koord loopt via een lineaire geleiding (de horizontale geleidarm) en diverse katrollen naar het contragewicht in de verticale buis. De lineaire geleiding is opvouwbaar uitgevoerd zodat het systeem tijdens vervoer compact meegenomen kan worden of compact kan worden gesteld wanneer het niet gebruikt wordt.





- Aan de lineaire geleiding bevindt zich een wagentje dat heen en weer bewogen wordt. De functie van het wagentje is, er voor te zorgen dat het koord bij alle voor / achterwaartse bewegingen een loodrechte hoek ten opzichte van de lineaire geleiding blijft maken. Hiermee worden krachten met een ongewenste richting op de onderarm van de gebruiker voorkomen.

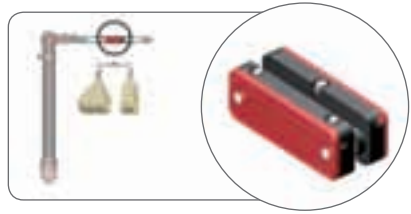

- De lineaire geleiding is aan het rotatie-element bevestigd. Dit rotatie-element verbindt de lineaire geleiding met de koker en maakt draaiing van de lineaire geleiding ten opzichte hiervan in het horizontale vlak mogelijk.



- Bovenop de koker en onderaan het rotatie-element bevinden zich de onderdelen waarmee de rotatie begrensd kan worden. Hiertoe bevindt zich een kunststof stop in de onderzijde van het rotatie-element (a) en in



gaten aan de bovenzijde van de koker kunnen op nader te kiezen plaatsen metalene pinnen in de ingeboorde gaten (b) geplaatst worden. Met de lineaire geleiding kunnen vervolgens alleen rotatiebewegingen binnen het begrensde traject uitgevoerd worden. Het doel hiervan is dat men, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen wanneer de gebruiker deuren passeert, niet in een ongewenst traject gaat bewegen. Deze begrenzing is optioneel.

- Direct onder het rotatie-element, aan de achterzijde van de koker, bevindt zich een pal met een veer.

Deze pal maakt het mogelijk om de rotaties volledig te blokkeren.


De voorziening wordt bijvoor-

beeld gebruikt tijdens het vervoer van de gebruiker in een bus, waarbij door krachten van buitenaf de lineaire geleiding heen en weer kan gaan zwaaien. Het blokkeren van de rotatie is in diverse posities mogelijk. Deze blokkering van rotaties is optioneel.



- In de koker bevindt zich het con-  
tragewicht (a). Dit contragewicht kan na levering extra verzwaard worden. Hiertoe bevinden zich drie losse gewichten in de koker in de vorm van ronde, platte

schijven. Deze ‘groeigewichten’ (b) kunnen onderaan het contragewicht gehangen worden. Deze voorziening is eveneens optioneel.

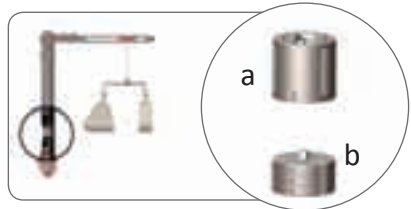

- De onderzijde van de koker wordt in de instelunit geplaatst die zich bevindt op de bovenzijde van de adapter voor montage op de stoel, rolstoel of het verrijdbare onderstel. De eerdergenoemde

instelunit zorgt er voor dat de koker altijd loodrecht ten opzichte van het grondoppervlak kan worden uitgelijnd. Voor de uitlijning zorgt een drietal instelringen. De uitlijning voorkomt dat de arm onder normale omstandigheden ongewenst naar binnen of naar buiten zwaait.



## MONTAGE VAN DE SLING

Na uitgebreide proefpassing en evaluatie wordt de dynamische arondersteuning door FOCAL Meditech op de gekozen voorziening geplaatst. Dit plaatsen is individueel maatwerk. Ook het overzetten van de SLING op een nieuwe voorziening dient door FOCAL Meditech te gebeuren.


## INSTELLEN VAN DE SLING




Let op! Voor u de SLING gaat instellen, dienen de zitelementen van de (rol)stoel in de meest gangbare actieve zithouding geplaatst te worden.

### **Horizontaal stellen.**

Allereerst dient de instelunit die bovenop de adapter is gemonteerd horizontaal te worden gesteld met behulp van de bijgeleverde waterpas en inbusleutel. Dit instellen gebeurt door de centrale inbusbout binnenin de instelunit los te draaien.

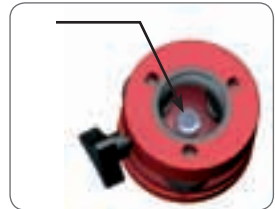

De waterpas wordt nu bovenop de instelunit geplaatst en vervolgens wordt met behulp van de drie instelringen een exact horizontale positie gezocht. Draai de centrale inbusbout nu weer vast. De koker kan nu in de instelunit geplaatst worden. Zowel op de instelunit als op de koker bevindt zich een pijl. Deze beide pijlen dienen tegenover elkaar te staan.

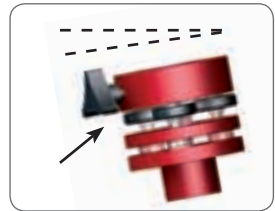

Zodoende wordt voorkomen dat de lineaire geleiding zich kan bewegen in een gebied waarin beweging niet gewenst is. De hoogte van het systeem kan nu ingesteld worden door middel van de knop die zich onderaan de instelunit bevindt.




### **Instellen rotatiebegrenzing.**

Stel nu, indien gewenst, het werkgebied in.




Doe dit door het moertje achterop en bovenaan de koker los te draaien.

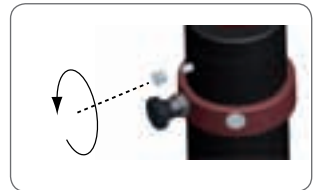

Draai vervolgens met de bijgeleverde inbus-sleutel (2,5 mm.) de inbusbout los die u onder het moertje aantrof. Deze inbusbout borgde eerder het rotatiemechanisme.




Tenslotte moet de trekpal, waarmee het rotatie-element volledig geblokkeerd kan worden, ontgrendeld worden. Doe dit door de trekpal uit te trekken en een kwart slag te draaien.

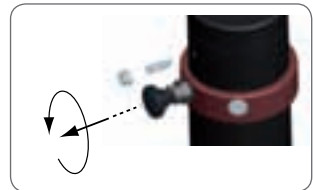

Het rotatiemechanisme, bevestigd aan de lineaire geleiding, kan nu omhoog getrokken worden.



Bovenop de koker bevindt zich een gatenpatroon (a) waarin op de door u gewenste plaatsen kleine metalen pinnen (b) geplaatst kunnen worden.

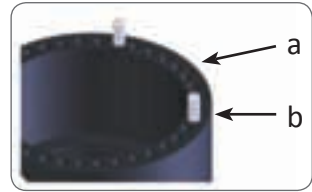

Onderop het rotatie-element bevindt zich een rotatiestop, die zich tussen de twee blokkeringspinnen beweegt. Deze stop en pinnen beperken de uitslag van de SLING, waardoor de arm niet in een ongewenst werkgebied kan komen.




Plaats de rotatie-unit met de lineaire geleiding weer terug op de koker. Let op dat de rotatiestop aan de bovenzijde tussen de twee blokkeringspinnen valt. Draai het boutje weer geheel aan, tot dit aan de binnenzijde vast zit tegen het rotatie-element. Draai nu het boutje drie hele slagen terug en draai het moertje weer hierop vast ter borging.


### **Balansarm instellen.**

De gewenste balans van de onderarm kan ingesteld worden door het klosje ten opzichte van de staaf te verschuiven. Zoek een dusdanige balans dat de onderarm in de draagelementen gemakkelijk omhoog en weer terug gekanteld kan worden.


Het verschuiven van het klosje gebeurt door een inbusboutje aan de onderzijde ervan los te draaien. Verschuif de staaf in het klosje, en draai het inbusboutje weer vast.

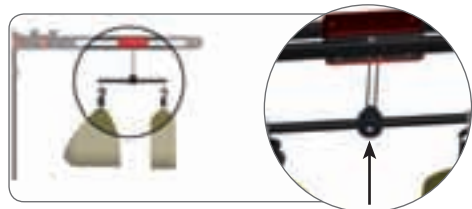

Hoe meer het klosje naar achteren (richting elleboog) geplaatst wordt, hoe gemakkelijker arm en hand omlaag gekanteld worden.

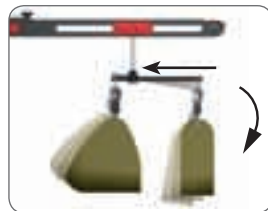


Plaatst men het klosje meer naar voren, richting pols, dan worden arm en hand gemakkelijker omhoog gekanteld.

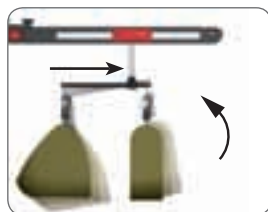


De instelling dient zodanig te zijn, dat de onderarm in de laagste positie op de armlegger of desgewenst op de schoot van de gebruiker kan rusten.

#### **Aanpassen van het contragewicht.**

Door middel van de optioneel meegeleverde groeigewichten kan het contragewicht aangepast worden. Indien gekozen, zijn er drie groeigewichten meegeleverd. Deze groeigewichten bevinden zich onderin de verticale koker. Om hinderlijk rammelen te voorkomen zijn zij aanvankelijk aan elkaar gemonteerd. Om het contragewicht aan te passen doorloopt u de volgende stappen:

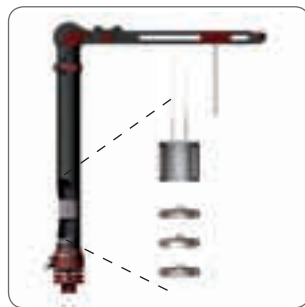

- 1) Klap de lineaire geleiding in als beschreven op bladzijde (15).
- 2) Verwijder de koorden van de geleiderollen nabij het knikmechanisme (a). Hierdoor verplaatst het contragewicht zich naar de onderste positie van de koker (b).

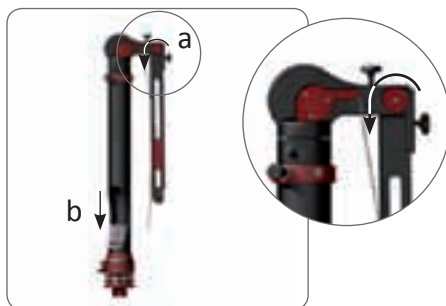


- 3) Onderin de koker (via de opening) is nu de onderzijde van het contragewicht (a) zichtbaar. De drie groeigewichten (b) waren al eerder zichtbaar.



- 4) Roteer met behulp van een kleine schroevendraaier via de opening het contragewicht, tot de inbusbout van het contragewicht bereikbaar wordt.



- 5) Het contragewicht (a) is op dit moment over het bovenste groeigewicht (b) gezakt. Dit groeigewicht kan nu aan het contragewicht bevestigd worden door de onderste inbusbout (c) in het contragewicht vast te draaien. Op dit moment zijn nog alle groeigewichten aan het contragewicht gekoppeld.

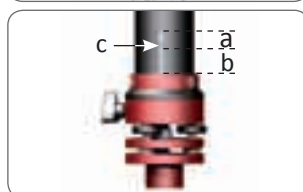

- 6) Per groeigewicht wordt circa 100 gram aan het contragewicht toegevoegd. U kunt nu kiezen om één, twee of drie groeigewichten toe te voegen. Indien u de inbusbout **in groeigewicht één** losdraait ontkoppelt u de onderliggende gewichten en voegt u uitsluitend groeigewicht één toe. Indien u de inbusbout **in groeigewicht twee** losdraait ontkoppelt u het onderste gewicht en voegt u groeigewicht één en twee toe. Indien u de inbusbout **in groeigewicht drie** losdraait, ontkoppelt u het laatste groeigewicht en voegt u groeigewicht één, twee en drie toe aan het contragewicht.




- 7) Leg de koorden weer over de geleiderollen.  
8) Vouw de lineaire geleiding weer uit zoals beschreven op bladzijde 15. Beoordeel nu de werking van het aangepaste contragewicht.  
9) Indien de werking van het contragewicht nog niet naar wens is kunt u de stappen 1 tot en met 8 herhalen om het juiste gewicht te bereiken.

## HET GEBRUIK VAN DE SLING

Het gebruik van de SLING wordt bepaald door de individuele behoeftes en wensen van de gebruiker, alsmede door de omgeving waarin deze van het hulpmiddel gebruik wil maken. De met behulp van de dynamische arondersteuning uitvoerbare activiteiten zijn ongelimiteerd. In de ADL sfeer gaat het vooral om het zelfstandig eten en drinken en om handelingen zoals gezichts- en gebitsverzorging en voorzieningen als een bril of gehoorapparaat aan het hoofd bereiken. Veel voorkomende activiteiten zijn schrijven, computergebruik, het doen van arbeidsmatige taken, het doen van huishoudelijke activiteiten, kinderverzorging, spelen en het doen van hobbyactiviteiten. Echter, ook bij alledaagse handelingen zoals schakelaars en drukknoppen gebruiken en apparatuur bedienen is de SLING inzetbaar. Frequent wordt de dynamische arondersteuning gemonteerd op een handbewogen of elektrische rolstoel; montage op een werkstoel komt eveneens vaak voor.

Voor het dagelijks gebruik zijn de navolgende handelingen van belang:

- Afnemen. De SLING kan desgewenst van de instelunit afgenomen worden. Dit gebeurt door de hendel op de instelunit één slag te draaien.

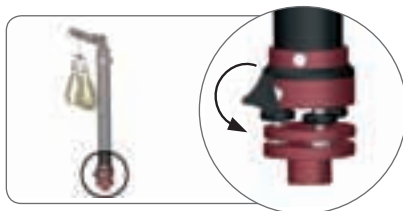


- Trek de SLING nu rechtstandig omhoog. De SLING kan vervolgens op een andere voorziening of op de bijgeleverde grondplaat geplaatst worden. Het laatste wordt gedaan indien men de SLING enige tijd niet wenst te gebruiken.





- Blokkeren. Tijdens vervoerssituaties kan het gewenst zijn om de rotatie van de lineaire geleiding te blokkeren. Doe dit door de trekpal bovenaan de koker uit te trekken en een kwartslag te draaien. Roteer de lineaire geleiding enigszins, tot deze blokkeert. Om de blokkering op te heffen trekt u de trekpal weer naar buiten en draait deze wederom een kwart slag aan.

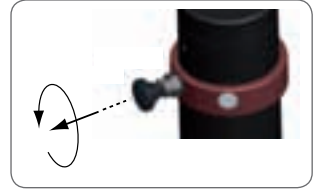

### **Verkleinen**

Om de SLING (bijvoorbeeld gedurende opslag) te verkleinen kan de lineaire geleiding neergeklapt worden:

- Bovenop de lineaire geleiding bevindt zich een schuifplaat met draaiknoppen. Draai de voorste knop één slag los, en draai de achterste knop los tot de onderste rand van die knop boven de schuifplaat uitsteekt.
- De schuifplaat kan nu naar voren geschoven worden.
- Vervolgens kan de lineaire geleiding neergeklapt worden. Het opklappen gebeurt in omgekeerde volgorde; steun hierbij het uiteinde van de lineaire geleiding. Let er gedurende het gebruik op dat de twee knoppen van de schuifplaat volledig aangedraaid zijn.



Als gedurende het gebruik blijkt dat de assistentie door middel van de contragewichten niet meer voldoet dient contact te worden opgenomen met FOCAL Meditech.

## WAARSCHUWING



Let er bij het passeren van deuren op dat de lineaire geleiding zich niet buiten het vlak van de rolstoel bevindt en de deuropening kan raken.

Let er bij het bewegen van de lineaire geleiding in de directe nabijheid van andere personen op niet tegen deze personen aan te stoten.

## ONDERHOUD

De dynamische arondersteuning vraagt weinig onderhoud. Het hulpmiddel kan met behulp van een vochtige doek en een niet-agressief reinigingsmiddel worden gereinigd.

## GARANTIE

### ALGEMEEN

Deze garantiebepalingen maken deel uit van de Algemene Voorwaarde van FOCAL Meditech. Bij de Garantiebepalingen dient het in de Algemene Voorwaarden gestelde in acht te worden genomen.

De onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Het in de handel brengen en toepassen van medische hulpmiddelen worden voorts nader geregeld in Richtlijn 93/42/EEG en het KB 243 van 30 maart 1995. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantievoorwaarden van de wederverkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Garantietermijnen en -bepalingen kunnen verlengd of gewijzigd worden indien zulks schriftelijk en met inachtneming van de wettelijke bepalingen is overeen gekomen.

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd en gemonteerd. Het kan desondanks voorkomen dat er een defect optreedt. FOCAL Meditech zal dit op verzoek herstellen,

zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt zodoende niet negatief beïnvloed.

## **GARANTIEBEPALINGEN**

Voor dit product verlenen wij garantie volgens de onderstaande voorwaarden:

### **Artikel 1**

Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 14 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In het geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.

### **Artikel 2**

De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden volgens het inzicht van FOCAL Meditech hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

### **Artikel 3**

Het gebrek moet terstond worden gemeld om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.

#### **Artikel 4**

Voor een beroep op garantie dient het op naam gestelde aankoopbewijs of het op naam gestelde afleverbewijs met aankoop en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.

#### **Artikel 5**

De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend maatafwijkingen, die voor de waarde, deugdelijkheid of functionaliteit van het product onbeduidend zijn.

#### **Artikel 6**

De garantie heeft geen betrekking op de schade ontstaan door onzorgvuldig gebruik of door gebruik ten behoeve van andere gebruiksdoel-einden dan waarvoor het product is ontworpen.

#### **Artikel 7**

De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

- 1) Chemische en elektrochemische inwerking van water of andere vloeistoffen.
- 2) Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen.
- 3) Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden waar onder ongebruikelijke drukken en versnellingen.
- 4) Contact met agressieve stoffen.
- 5) Verwaarlozing.
- 6) Enige andere oorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld stoten of de gevolgen van aanrijding.

#### **Artikel 8**

De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de handleiding voor gebruik.

## **Artikel 9**

Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of deskundig zijn, of wanneer het product werd voorzien van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Het recht op garantie vervalt eveneens indien merk- of serienummers zijn verwijderd.

## **Artikel 10**

Herstel ter plaatse binnen 14 dagen wordt nagestreefd. Reparatie ter plaatse kan evenwel alleen worden geleverd indien het een gering defect betreft, zulks ter beoordeling door FOCAL Meditech, en vervoer van het hulpmiddel naar een werkplaats kan noodzakelijk zijn.

## **Artikel 11**

Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

## **Artikel 12**

Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Dit met uitzondering van het deel van het product dat onderwerp was van herstelling.

Op herstellingen geeft FOCAL Meditech een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

## **Artikel 13**

Noodzakelijke of gewenste aanpassingen maken geen deel uit van het standaard product zoals dit is gedocumenteerd in de handleiding. FOCAL Meditech zal trachten om defecten aan individuele aanpassingen te behandelen conform de garantiebepalingen voor het standaard product. Noodzakelijke of gewenste individuele aanpassingen maken evenwel geen deel uit van de garantiebepalingen.

## **Artikel 14**

Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of de gebruikscondities aldaar (o.a. spanning, klimaatomstandigheden) in overeenstemming zijn met de vastgelegde gebruikscondities. In het geval van wederverkoop is de wederverkoper de partij die garantie dient te verlenen.

FOCAL Meditech hecht een groot belang aan het goed functioneren van haar producten, die veelal ten dienste staan van personen met aanzienlijke beperkingen. Overleg omtrent defecten aan- of disfunctioneren van het product tengevolge van factoren die niet in de garantievoorwaarden beschreven staan wordt ten zeerste aangeraden.

De servicefaciliteiten van FOCAL Meditech staan de gebruiker ook na de garantietermijn ter beschikking.

## CE KEURMERK



Dit product is CE goedgekeurd en voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

## CONTACTINFORMATIE

**De dynamische armondersteuning SLING en bijbehorende accessoires worden gefabriceerd en geleverd door:**

FOCAL Meditech BV  
Droogdokkeneiland 19  
5026 SP Tilburg  
Nederland

Tel.: 013-533 31 03

Fax: 013-533 50 04

E-mail: [info@focalmeditech.nl](mailto:info@focalmeditech.nl)

Internet: [www.focalmeditech.nl](http://www.focalmeditech.nl)

## Notities





