


Bedieningspaneel

De functionaliteiten zijn ingedeeld in drie kolommen

- 1 Gewichtscompensatie**
- 2 Kantelverstelling**
- 3 Tilfunctie**

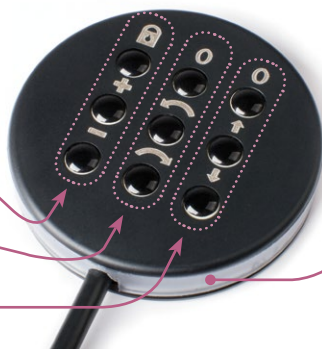

Lichtsignalen


De ring rond het bedieningspaneel geeft blauwe en rode lichtsignalen af:

- * Armbewegingen geblokkeerd
- * * Armbewegingen gedeblokkeerd
- * * Einde van het verstelbereik van tilfunctie of gewichtscompensatie bereikt
- * * Uw opdracht wordt niet uitgevoerd omdat verstelling niet is toegestaan
- * * * Algemene foutmelding

1 Gewichtscompensatie - uw arm makkelijker omhoog bewegen

-  **Blokkeren / deblokkeren**
uw arm in een gewenste positie blokkeren
-  **Gewichtscompensatie vergroten**
uw arm gaat makkelijker omhoog
-  **Gewichtscompensatie verkleinen**
uw arm gaat makkelijker omlaag

Gewichtscompensatie is de opwaartse kracht die uw arm helpt omhoog te bewegen. Deze kracht heft als het ware het gewicht van uw arm op. De mate van gewichtscompensatie kunt u op elk moment zelf aanpassen naar uw eigen wensen en omstandigheden.

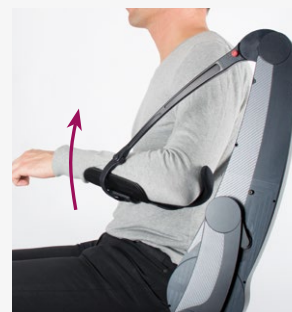

2 Kantelverstelling - uw arm makkelijker naar voren bewegen

-  **Naar 0 graden kantelen**
precies waterpas t.o.v. de aarde
-  **Naar voren kantelen**
beter bereik naar voren
-  **Naar achteren kantelen**
beter bereik naar uw lichaam toe


Met de kantelverstelling bepaalt u de hoek van Gowing ten opzichte van de aarde. Dit kan naar voren en naar achteren. U kunt deze verstelling elk moment gebruiken om uw arm makkelijker en verder naar voren te bewegen of juist dichterbij uw lichaam te brengen.



3 Tilfunctie - uw arm laten rusten op een bepaald punt

-  **Tilfunctie uitschakelen**
u kunt volledig vrij bewegen
-  **Tilpositie verhogen**
hogere vaste positie voor uw arm
-  **Tilpositie verlagen**
lagere vaste positie voor uw arm

De tilfunctie is tweeledig:
1: Het heft de arm gemotoriseerd naar iedere gewenste hoogte, die anders niet bereikt kan worden.
2: Het laat de arm op een bepaalde hoogte rusten. Dit is handig als u uw arm lang in dezelfde positie moet houden.

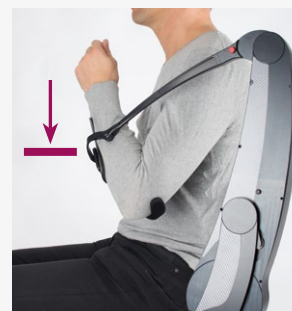

Afnemen van de hefarm

De hefarm kan gemakkelijk afgenomen worden. Dit is handig als u Gowing een kortere periode niet wilt gebruiken. De hefarm zit u dan niet in de weg.



Druk de twee rode knoppen gelijktijdig in.



Beweeg de hefarm uit het bevestigingspunt.

Afnemen van Gowing in zijn geheel

Gowing kan in zijn geheel worden afgenomen van de (rol)stoel. Dit is handig als u Gowing langere tijd niet wilt gebruiken of niet wilt meenemen.



Trek de rode hendel omhoog.



Til Gowing recht omhoog van de adapter voor montage af.

Gowing inschakelen

Het verstellen en blokkeren van Gowing werkt alleen als de stroom is ingeschakeld. De schakelaar bevindt zich op de adapter voor montage.

0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld



Uitgebreide handleiding

In deze snelstarhandleiding kunt u lezen hoe u de meest gebruikte functies toepast. Maar voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de **Handleiding Gowing**. Deze vindt u op de usb-stick in de koffer waarin Gowing geleverd is. Ook kunt u de handleiding downloaden vanaf onze website: www.focalmeditech.nl en dan 'Documentatie' en daarna 'Dynamische armoedersteuningen'.

We wensen u een prettig gebruik van Gowing en we hopen dat hij een bijdrage levert aan uw zelfstandigheid.