

Reinigingsadviezen voor Paro de Robotzeehond

Om Paro schoon, fris en hygiënisch te houden kan Paro schoongemaakt worden op locatie. Wij raden aan Paro na elke sessie, bijvoorbeeld na een ochtend, middag of dag, te reinigen.

Door Paro zijn vuil- en waterafstotende vacht zal vuil makkelijk te verwijderen zijn. Hier onder zijn twee reinigingsmethodes weergegeven hoe Paro schoon te maken of op te frissen. Deze methodes zijn gebaseerd op ervaringen en onderzoeksresultaten.

Het reinigen van Paro is op eigen risico, maak vooral Paro niet te nat maar enkel vochtig/klam. En let op met vocht rondom het oplaadpunt in de mond. Mocht Paro zo vies zijn dat dit niet zelf te reinigen is kan Paro opgestuurd worden en door ons intensief gereinigd worden.

Neem gerust contact op bij vragen!

Method 1: Reinigen & Desinfecteren

Benodigheden:

- Vaatdoek/schoonmaakdoek
- Warm water
- Desinfecterende (hand)zeep
- Kam of borstel

1. Maak de vaatdoek nat met warm water en knijp deze goed uit.
2. Plaats een kleine hoeveelheid zeep op de vochtige doek. Wrijf vervolgens Paro schoon met de doek. Dit mag tegen de haren in om zo alle plekken te bereiken.
3. Neem Paro vervolgens af met een vochtige doek **zonder** zeep om schuim en zeepresten zorgzaam te verwijderen.
4. Laat Paro lucht drogen, stop hem niet vochtig terug in de doos.
5. Kam Paro met een kam met grote tanden met de vacht mee.

Method 2: Desinfecteren

Benodigheden:

- Ontsmettende / alcohol (hand) doekjes of spray
- Kam of borstel

1. Pak een ontsmettend doekje en neem daar Paro mee af of spray Paro in, dit mag tegen de haren in om zo alle plekken te bereiken. Gebruik zoveel doekjes als nodig.
2. Laat Paro lucht drogen, stop hem niet vochtig terug in de doos.
3. Kam Paro met een kam met grote tanden met de vacht mee.

Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met Lisa de Leeuw: l.de.leeuw@focalmeditech.nl

013 5333103

Methode 3: Opfrisbeurt (vooral bedoelt voor snel reinigen en geurverbetering)

Benodigheden:

- Droogshampoo
 - Kam of borstel
1. Kam Paro door zodat de vacht geen klitten bevat.
 2. Spuit droogshampoo op Paro en laat dit even intrekken
 3. Kam Paro vervolgens goed door.