

Introduction / Voorwoord

This Information Card contains an overview of the device. The aim of this information is to ensure successful, safe and effective use of the device. This Information Card will give you a quick look on the features and important safety warnings. Please take note of the safety warnings before using it.

Deze Informatiekaart bevat een overzicht van het apparaat. Het doel van deze informatie is te zorgen voor een succesvol, veilig en effectief gebruik van het apparaat. Deze Informatiekaart geeft u een snelle blik op de functies en belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd rekening met de veiligheidswaarschuwingen voordat u het apparaat gebruikt.

Complete user manual / Complete gebruikershandleiding

The complete user manual is available on our website and can be downloaded (<http://www.focalmeditech.nl/en/documentation>). In case you want to receive a printed user manual in your own language, please contact us at **+31 (0)13 533 31 03** and we will send you without any costs a hard copy.

De complete gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website en gedownload worden op (<http://www.focalmeditech.nl/nl/documentatie>). In het geval dat u een geprinte gebruikershandleiding wil, neem contact op via **+31 (0)13 533 31 03** en we zenden u een geprint exemplaar toe.

Overview / Overzicht

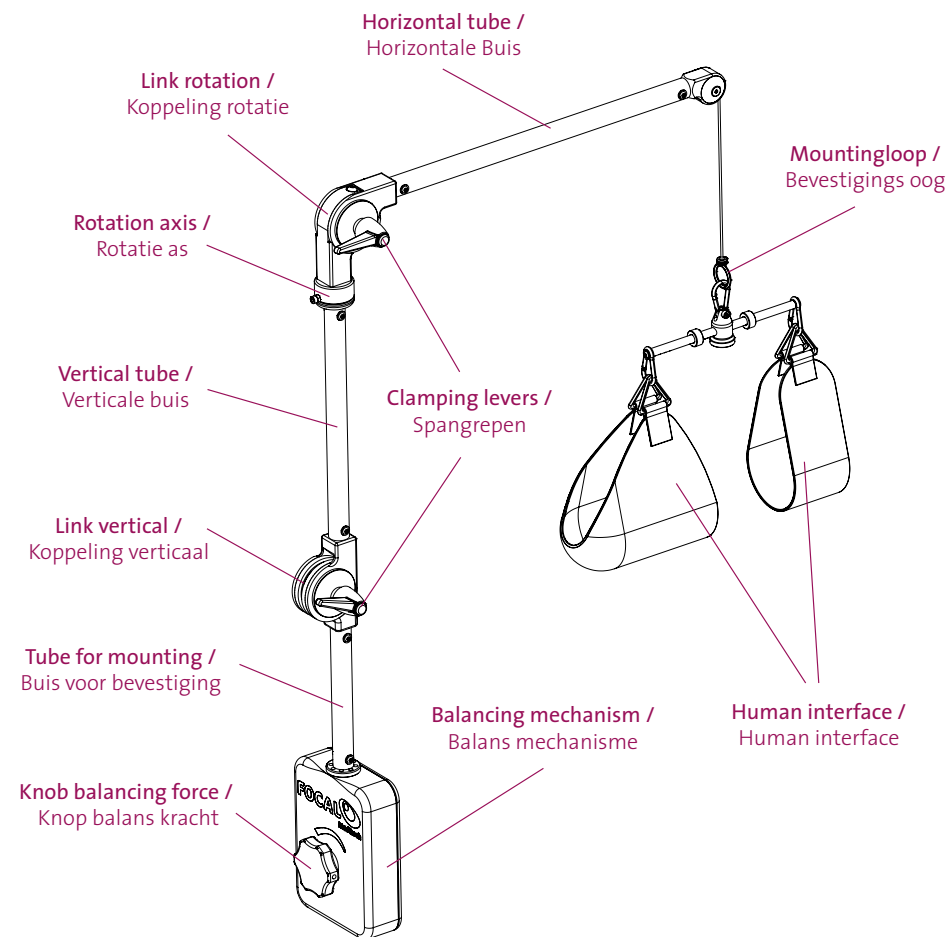


Figure 1: Overview with terms of specific parts

Figuur 1: Overzicht met benaming specifieke onderdelen

Balancer Information Card / Informatiekaart

Safety notices / Veiligheidsnotities



Danger: Prevent direct contact with water or any other liquid. Failure of this can lead to malfunctioning of device or bodily harm.

Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. Het niet voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het apparaat of tot lichamelijke schade.



Danger: Prevent extreme temperature (see environment conditions in user manual). Failure of this can lead to malfunctioning of the device or bodily harm.

Gevaar: Voorkom extreme temperaturen (zie omgevingscondities). Het niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of lichamenlijk letsel tot gevolg hebben.



Danger: In accordance with the Code VVR, the device must be disconnected from the wheelchair when the user is transported in the wheelchair by means of transport that is accessible for wheelchairs. Failure of this can lead to malfunctioning of device or bodily harm.

Gevaar: Conform de Code VVR dient het hulpmiddel van de rolstoel te worden afgenomen wanneer de gebruiker in de rolstoel middels een vervoersmiddel die toegankelijk zijn voor rolstoelen wordt vervoerd. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het hulpmiddel of tot lichamenlijk letsel.



Warning: Check for each use that the hinges are properly fixed.

Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik of de hengsels goed vastzitten.



Warning: Do not modify any part of this equipment without authorization of the manufacturer. Failure of this can lead to malfunctioning and will void the warranty.

Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel zonder toestemming van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan wordt, kan dit leiden tot onjuist functioneren en zal de garantie komen te vervallen.



Warning: In case of a faulty device contact Focal Meditech. Do not try to fix it yourself. Failure of this will void the warranty.

Waarschuwing: Neem indien het apparaat onjuist functioneert direct contact op met Focal Meditech. Probeer het niet zelf te repareren. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot het verlies van garantie.



Warning: In case of doubt about the safety of the device contact Focal Meditech.

Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid van het apparaat contact op met Focal Meditech.



Warning: In case of a serious incident when using the device, contact Focal Meditech and the national authority of your country.

Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit apparaat dient contact te worden opgenomen met Focal Meditech en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Contact information / Contact informatie

Manufacture and sold by / Fabricage en verkocht door:

Focal Meditech BV

Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg, Netherlands

Tel.: +31 13 533 31 03 Fax: +31 13 533 50 04

info@focalmeditech.nl www.focalmeditech.nl