

Introduction / Voorwoord

This Information Card contains an overview of the device. The aim of this information is to ensure successful, safe and effective use of the device. This Information Card will give you a quick look on the features and important safety warnings. Please take note of the safety warnings before using it.

Deze Informatiekaart bevat een overzicht van het hulpmiddel. Het doel van deze informatie is te zorgen voor een succesvol, veilig en effectief gebruik van het hulpmiddel. Deze Informatiekaart geeft u een snelle blik op de functies en belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd rekening met de veiligheidswaarschuwingen voordat u het hulpmiddel gebruikt.

Complete user manual / Complete gebruikershandleiding

The complete user manual is available on our website and can be downloaded (<http://www.focalmeditech.nl/en/documentation>). In case you want to receive a printed user manual in your own language, please contact us at **+31 (0)13 533 31 03** and we will send you without any costs a hard copy.

De complete gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website en gedownload worden op (<http://www.focalmeditech.nl/nl/documentatie>). In het geval dat u een geprinte gebruikershandleiding wil, neem contact op via **+31 (0)13 533 31 03** en we zenden u een geprint exemplaar toe.

Overview / Overzicht

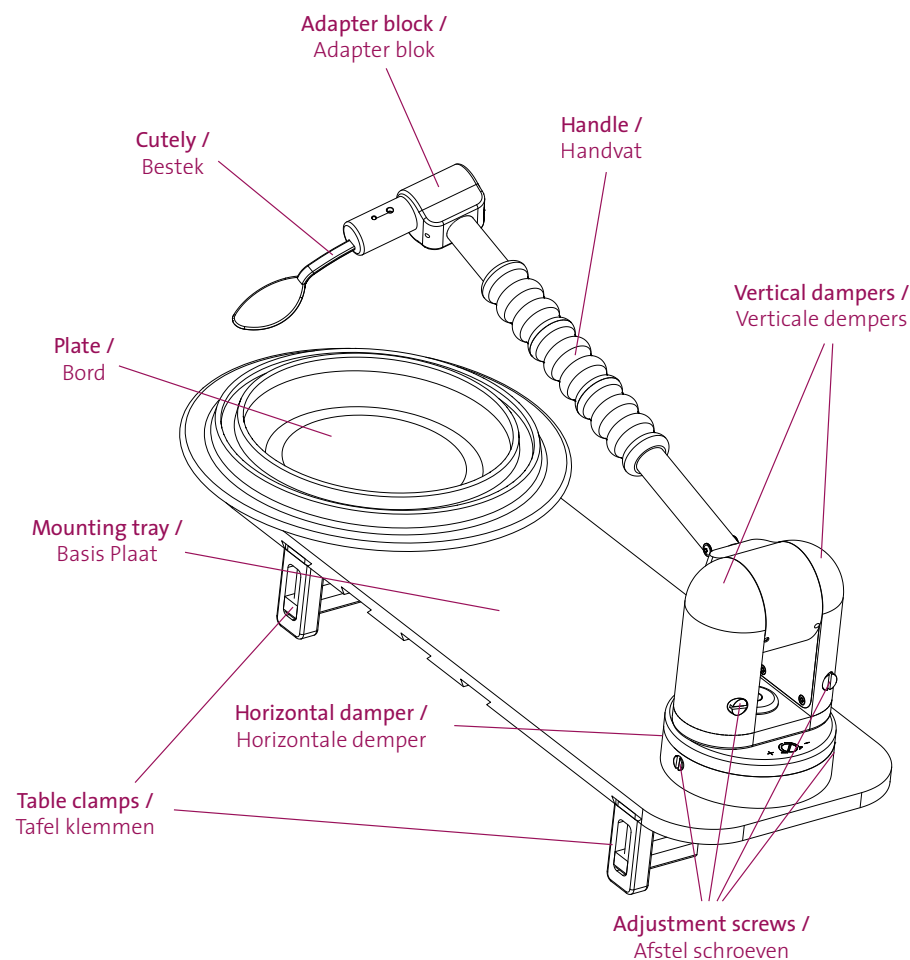


Figure 1: Overview with terms of specific parts

Figuur 1: Overzicht met benaming specifieke onderdelen

Safety notices / Veiligheidsnotities



Danger: Prevent direct contact with water or any other liquid. Failure to prevent can lead to malfunctioning of device or bodily harm.

Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. Het niet voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het hulpmiddel of tot lichamelijke schade.



Danger: Prevent exposure to extreme temperature (see environment conditions). Failure to prevent can lead to malfunctioning of the device or bodily harm.

Gevaar: Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen (zie omgevingscondities). Het niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of lichamenlijk letsel tot gevolg hebben.



Warning: Do not modify any part of this device without authorization of Focal Meditech. Otherwise this can lead to malfunctioning and will void the warranty.

Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel zonder toestemming van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan wordt, kan dit leiden tot onjuist functioneren en zal de garantie komen te vervallen.



Warning: In case of a faulty device contact Focal Meditech. Do not try to fix it yourself. Failure to do this this will void the warranty.

Waarschuwing: Neem indien het hulpmiddel onjuist functioneert direct contact op met Focal Meditech. Probeer het niet zelf te repareren. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot het verlies van garantie.



Warning: In case of doubt about safety of the device contact Focal Meditech.

Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid van het hulpmiddel contact op met Focal Meditech.



Warning: In case of a serious incident when using the device, contact Focal Meditech and the national authority of your country.

Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit hulpmiddel dient contact te worden opgenomen met Focal Meditech en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.



Warning: Nelson is not intended to be used nearby flammable substances. Nelson is not AP or APG certified e.g. Nelson is not intended to be used nearby anaesthetic gasses.

Waarschuwing: Nelson is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van brandbare stoffen. Nelson is niet AP- of APG-gecertificeerd, bijvoorbeeld voor gebruik in de buurt van anesthesische gassen.

Contact information / Contact informatie

Manufacture and sold by / Fabricage en verkocht door:

Focal Meditech BV

Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg, Netherlands

Tel.: +31 13 533 31 03 info@focalmeditech.nl

www.focalmeditech.nl